

## Lingettes désinfectantes Aseptonet sans alcool Paquet de 100



- Lingettes épaisses (18 x 20 cm) nettoyantes et désinfectantes pour:
  - Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...)
  - Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...)

- Mode d'emploi :  
Produit prêt à l'emploi à usage unique. Soulever le couvercle et retirer l'étiquette autocollante. Sortir une lingette du paquet. Passer 3 lingettes par m<sup>2</sup> de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer, sauf si le produit est en contact avec les denrées alimentaires ou aliments pour animaux.